

ReSound ja Beltone kuulokojeiden pikaohje


- Tervetuloa paremman
kuulemisen pariin!



ReSound GN

3 helppoa OHJETTA kuulokojeen käyttöön

1. HOITO-OHJEET

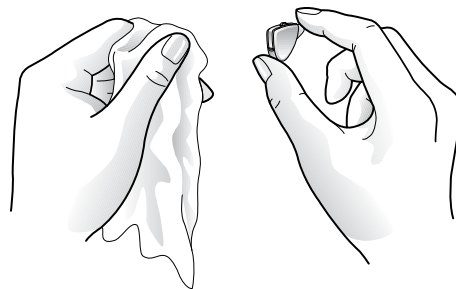

Pidä kuulokoje puhtaana, jotta se toimisi oikein.

Tämä on yleisohje kuulokojeiden päivittäiseen huoltoon. Mallikohtaiset hoito-ohjeet on käyttöohjeessa.

1. Pyyhi kuulokojeen pinta päivittäin esimerkiksi talouspaperilla. Pyyhi myös muut mallikohtaiset osat: ääniletku, kuuloke, RIE-korvakappale tai tippi.

2. Puhdista mikrofoniaukot puhdistusharjalla ja mahdollinen ohutääniletku puhdistussiimalla (kuva 2).

3. Avaa paristokotelon kansi kun koje ei ole käytössä.

Puhdista yksilöllinen BTE-korvakappale viikottain:

- Irrota korvakappale kuulokojeesta.
- Pese korvakappale haalealla vedellä ja pesuaineella. Anna veden valua kanavien läpi.
- Huuhtelee juoksevan veden alla.
- Kuivaa pinta huolellisesti ja puhalla vesi pois äänikanavasta (kuva 3).
- Liitä korvakappale takaisin kiinni.

Vaihda ääniletku kerran kuussa:

- Irroita ääniletku sekä kuulokojeen koukusta, että korvakappaleen koukusta.
- Liitä saman pituinen uusi ääniletku kiinni sekä kuulokojeen, että korvakappaleen koukkuun.


Audionomisi ohjeistaa oman mallisi hoidossa. Pyydä tarvittaessa lisää käyttöopetusta. Hae lisätietoa:

www.resound.com


Hae käyttöopastusvideoita:

[youtube.com/byReSound](https://www.youtube.com/byReSound)

1. BTE-korvakappaleen puhdistaminen

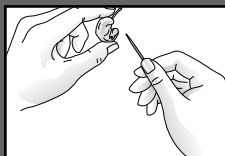

2. Ohutääniletkun puhdistaminen

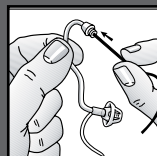


3. BTE-korvakappaleen kuivaaminen





BTE-koje
(Behind The Ear)

ITE-koje
(In The Ear)

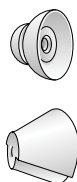

Tippejä



Ohutääni-
letku

Perinteiset kuulokkeet (audionomi vaihtaa):



S-kuuloke




NP/LP-kuuloke



HP-kuuloke

SureFit kuulokkeet (audionomi vaihtaa):

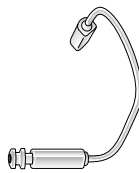

LP-kuuloke



MP-kuuloke



HP-kuuloke

2. TARVIKKEET

Oikeilla tarvikkeilla ja säännöllisellä huollolla varmistat kuulokojeen toimivuuden.

PARISTOT

Pidä aina oikean kokoisia tuoreita paristoja saatavilla. Ilmaa uusi paristo noin 2 min. Paristoissa on laatueroja.

MALLIKOHTAISET TARVIKKEET

Yksilölliseen sovitukseen voi kuulua säännöllisesti vaihdettava vahasuoja, ääniletku, ohutääniiletku tai tippi.

Kuuloke vaihdetaan tarvittaessa, korvakappale vain jos se on rikki.

LANGATTOMAT YHTEYDET

Useimmat ReSound ja Beltone kuulokojeet ovat yhteensopivia langattomien ReSound-lisälaitteiden kanssa. Ne helpottavat kuuntelua arjen haastavissakin tilanteissa. Voit taas nauttia esimerkiksi puhelin-keskusteluista ja TV:n katselusta perheen parissa. Tilaa lisälaitteet paikalliselta ReSound jälleenmyyjältäsi tai soita ReSoundille (09) 4777 9700.

Voit ostaa kuulokojeiden tarvikkeita ja puhdistusvälineitä ReSoundilta tai muista erikoisliikkeistä

www.resound.com/tarviketilaus

Tarvikemyynti P. (09) 4777 9700
tilaus@gnresound.com

Helpompi arki ReSound lisälaitteilla:



MicroMic MultiMic

TV-Lähetin

Kauko-ohjain

PhoneClip+



3. OMA KOJEENI

Tarvikkeiden tilaaminen on helppoa kun kirjaat ylös oman kuulokojeesi tiedot.

Kuulokoje on **yksilöllisesti sovitettu** lääkintälaitte. On hyvä kirjata ylös mm. tarviketiedot, kuulokojeen mallitunniste, mistä se on hankittu ja kuka audionomisi on. Helpointa asioiminen on kun kaikki tieto on koottu yhteen paikkaan. Audionomisi voi täyttää viereisen sivun **tuotekortin**. Pidä se hyvässä tallessa, vaikka lompakossasi.

Tuotemerkki ja malli:	_____
Sarjanumero(t):	_____
Paristo:	_____
Ääniletku / ohutääniletku / kuulokojejohto:	_____
Tippi / korvakappale:	_____
Vahasuoja:	_____
Lisälaitteet / sovellukset:	_____
Kuulokeskus/-liike:	_____
Audionomi:	_____
Yhteystiedot:	_____

Laitevalmistaja GN Hearing A/S:n Suomen toimipisteet ja ReSound myymälät
Espoo: Koronakatu 1 B, Olari
Helsinki: Pohjoinen Rautatiekatu 15, Kamppi

ReSound-myymöloistä hankit ReSound ja Beltone kuulokojeiden tarvikkeet ja lisälaitteet. Postitoimitus.
P. (09) 4777 9700, tilaus@gnresound.com

*Käytä kuulokojetta joka päivä
- ääniin totutteleminen vie aikaa*

YHTEYSTIEDOT

GN ReSound Finland Oy/Ab
PL 7, 02211 Espoo
S-posti: kuulo@gnresound.com

TILAUKSET:
P. (09) 4777 9700
tilaus@gnresound.fi

JÄLLEENMYYYJÄT:
www.resound.com/jalleenmyyjat

TUOTETIEDOT:
www.resound.com
www.beltone-hearing.com

ReSound GN

GN ReSound Finland Oy/Ab
PL 7, 02211 Espoo
P.: (09) 4777 9700
S-posti: kuulo@gnresound.com
www.resound.com
www.kuulo.fi
ReSound-liikkeet: Espoo ja Helsinki

ReSound GN