

耳かけ型 UPS リサウンド・アップ スマート™

取扱説明書

<p>製造販売元 GNヒアリングジャパン株式会社</p> <p>販売店様専用電話番号 ☎️ 0120-921-310</p> <p>一般のお客様電話番号 ☎️ 0120-921-102</p> <p>FAX番号 ☎️ 0120-636-392</p> <p>受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 (土日祝日、年末年始は休み)</p> <p>〒220-0012 神奈川県横浜市区西みなとみらい3-6-3MMパークビル8F</p>	
---	---

認証番号 226AABZX00185000
KTG0783 UPS 02 1803F-1803300

はじめに

この度はリサウンド補聴器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では当補聴器の操作手順、機能、故障が疑われる場合の原因と対策などについて説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を良く理解してから本文をお読みください。

■ **表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。**

	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

■ **お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。**

	この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
--	-------------------------

【禁忌・禁止】

- 次の場合、補聴器を使用しないでください。
 - 耳を治療中の場合
 - 耳の中に痛みがある場合
 - 先天的または外傷による明らかな耳の変形がある場合
 - 過去90日以内に耳漏を生じた経験がある場合
 - 過去90日以内に急激または急速な難聴の進行を生じた経験のある場合
 - 急性または慢性的のめまいがある場合
 - 耳あか、または異物の集積が明らかな場合
- 次の場合、補聴器を使用する前、あるいは使用を中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けてください。
 - 耳漏が生じたとき
 - 耳の治療が必要になったとき
 - 耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき

目次


はじめに

安全上のご注意

- 製品概要
 - 1-1. 各部の名称と役割
 - 1-2. 付属品一覧
- 基本的な使い方
 - 2-1. 電源の入れ方／切り方
 - 2-2. 電池寿命お知らせ機能
 - 2-3. 音量調節について
 - 2-4. プログラム変更について
 - 2-5. 電話での使用
 - 2-6. iPhone、iPad、iPod touchとの使用について
 - 2-7. スムーズホンの使用について
 - 2-8. テレコイルについて
 - 2-9. 外部入力について
- 使用上の注意
- 電池使用上の注意
- 故障かな?と思ったら
- 性能表
- 音響諸特性
- アフターサービスについて

1 製品概要

1-1. 各部の名称と役割

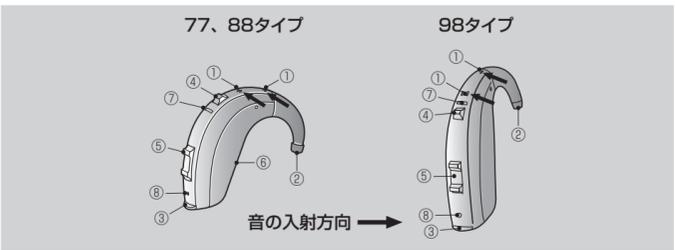

- 音の入口**
音声を集めるためのマイク
- 音の出口**
本体内部で増幅された音声を外耳道に導く
- 電池ケース**
電池を収納する
- プログラム選択ボタン**
プログラムを切り替える(選択する)際に使用
- ボリュームコントロール**
音量の調節を行う
- 外部入力端子**
オーディオシューを接続する端子
- LED ライト**
補聴器の作動状況を光でお知らせする
※チャイルドロック無し仕様の補聴器にはこの機能は付きません。
- チャイルドロック**
乳幼児が電池ケースを開けて電池を飲み込んでしまうことを防止
※チャイルドロック無し仕様の補聴器にはこの機能は付きません。

1-2. 付属品一覧（携帯用ケースを除く）

※ □にチェックマークをして、ご使用前にご確認ください。
※ 両耳で購入された場合、*マークのついたものは2個(本)付属します。

① 電池		② 耳せん	
77,88タイプ PR48/13 (1個)*	98タイプ PR44/675 (1個)*	77タイプのみ (1個)*	全タイプ (2個)*
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		※ご注文時に選択したものが付属します。	

③ チューブ		④ ミニチューブアダプタ	
77タイプのみ ミニチューブ (1本/もしくは左右各1本)*	全タイプ ジョイントチューブ (1本)*	77タイプのみ	※本体に付属 (1個)*
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ミニチューブを取り付ける際にふたは外してください。	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

⑤ イヤフック ペビー	⑥ 耳あか掃除ブラシ	⑦ 乾燥ケース
※チャイルドロック無し仕様の補聴器の場合はスタンダードが付属 ※本体に付属 (1個)*	(1本)	(1個)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

⑧ クリーニング クロス (1枚)	⑨ 左右識別チップ		⑩ チャイルドロック用 ジグ (2本)
<input type="checkbox"/>	77,88タイプ (左右各1本)*	98タイプ (左右各1本)*	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		※青が左用、赤が右用になります。	
		※チャイルドロック無し仕様の補聴器には付属しません。	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

○ オプション(別売)


⑪ イヤモールド	⑫ オーディオシュー		⑬ FM受信機一体型	
<input type="checkbox"/>	77,88タイプ	98タイプ	77,88タイプ	98タイプ
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

⑭ オーディオコード	⑮ マグネット(スムーズホン用)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ 左右識別チップの付け方

補聴器が左耳用か右耳用か識別するため付属しています。

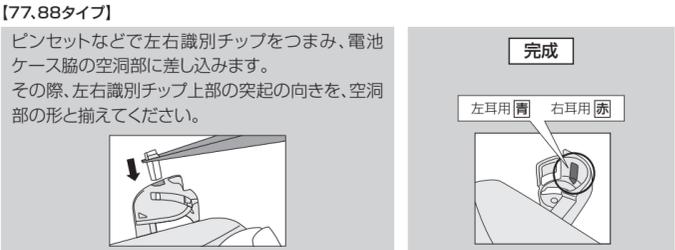

2 基本的な使い方

2-1. 電源の入れ方／切り方

電源の入／切は電池ケースで行います。電池ケースを完全に閉じると電源が入り、開けると電源が切れます。



※ 電池の消耗を防ぐために電源の切り忘れにご注意ください。

■ チャイルドロック

乳幼児が電池ケースを開けて電池を飲み込んでしまうことを防止する機能です。設定をすると、電源を切ることはできますが電池を交換することはできません。

■ 解除方法

※ チャイルドロック無し仕様の補聴器にはこの機能は付きません。



※ 電池ケースを閉めると、再度ロックされます。
※ 電池ケースを閉めたままジグを差し込むと解除に強い力が必要となり、ジグを破損させる恐れがあります。必ず電池ケースを2mm程開けた状態にて解除の作業を行ってください。

▲ 注意

(1) 専用のチャイルドロック用ジグのみを使用してください。
(2) 電池ケースが開くように、補聴器の横を持ってください。
(3) チャイルドロック用ジグを差し込む前に、電池ケースを開けて電源をオフにしてください。
(4) チャイルドロック用ジグは穴にまっすぐに差し込んでください。斜めに差し込んだり回転させたりするとチャイルドロック用ジグの先端を傷つける恐れがあります。

チャイルドロック用ジグを紛失・破損したり、他の介護者に渡すために追加のチャイルドロック用ジグが必要なおときには、お買い求めの販売店にご相談ください。

■ スマートスタート機能

補聴器を耳に装着する際に不快なハウリング(ピーピー音)を防ぐ為の機能です。この機能をオンにすると、電源を入れてもすぐには音声が入らず、代わりにお知らせ音(ポーン、ポーン、ポーン…)が鳴ります。

2-2. 電池寿命お知らせ機能

電池残量が少なくなると、電子音(ポポポポーン)が15分おきに繰り返し鳴り、補聴器の電源が自動的に切れます。電子音が鳴りましたら、新しい電池と交換してください。予備の電池を常に携帯することをおすすめします。

■ ワイヤレスアクセサリー(オプション)使用時


ワイヤレスアクセサリー使用時は、補聴器のみの使用時よりも補聴器の電池消費量が大きくなります。補聴器が使用できなくなるより前に、電子音が鳴りワイヤレスアクセサリーが使えなくなります。新しい電池に交換すると、ワイヤレスアクセサリーは再び使用できます。

電池残量	お知らせ音	補聴器	リモコン ユナイトII	TVユナイトII、 携帯ユナイトII、 マルチマイク、 マイクロマイク、 iPhone、iPad、 iPod touch
(多)	—	○	○	○
(少)		○	○	×
(極少)		×	×	×

2-3. 音量調節について

■ 音量調節

本補聴器は、必要に応じてお客様自身が音量を手動で調節することができます。

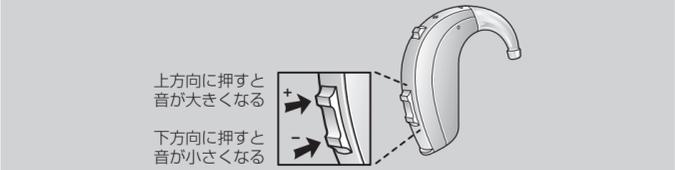

※ ボリュームコントロールを押すと「ピッピッ」というお知らせ音が鳴ります。上限あるいは下限に達すると「ポー」という音に変わります。
※ 電源を切ると、変更した音量は元に戻ります。

販売店で設定可能 **オン/オフ**

両耳連動機能使用時	販売店で設定可能	オン/オフ
片耳の補聴器の音量を変更するともう片方の補聴器の音量も自動的に変更します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2-4. プログラム変更について

お客様一人ひとりのきこえや使用環境に合わせて最大で4つのプログラムを設定することができます。プログラム選択ボタンを押すたびにプログラムが切り替わり、お知らせ音の回数でプログラム番号をお知らせします。

販売店で設定可能

プログラム	お知らせ音	内容・使用環境
プログラム1	ポーン	
プログラム2	ポーン、ポーン	
プログラム3	ポーン、ポーン、ポーン	
プログラム4	ポーン、ポーン、ポーン、ポーン	

電源投入時の設定	両耳連動機能使用時	販売店で設定可能	オン/オフ
●「プログラム1」	片耳の補聴器のプログラムを変更するともう片方の補聴器のプログラムも自動的に変更します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ フライトモード(ワイヤレス機能使用時)

搭乗中に電波の使用を禁じられている飛行機内や、無線送信および電波を発する機器の使用が禁止されている場所では、補聴器をフライトモードに設定してワイヤレス機能をオフにしてください。

■ フライトモードの設定方法



■ フライトモードの解除方法



※ 「ポポーン」というお知らせ音が鳴る場合は、①からもう一度行ってください。

■ LEDライト


※ チャイルドロック無し仕様の補聴器にはこの機能は付きません。LEDライトが補聴器の使用状況をお知らせします。LEDライトの機能設定はお買い求めの販売店で行うことができます。

プログラム開始	通常	
プログラム変更	フライトモード	
	プログラム1	
	プログラム2	
	プログラム3	
	プログラム4	
	FM/ワイヤレスアクセサリー	
音量調節	音量調節	
	音量最大/最小	
	電池残量低	

▶ 裏面へつづく

2-5. 電話での使用

本補聴器は、装着したままでも電話を使用することができます。

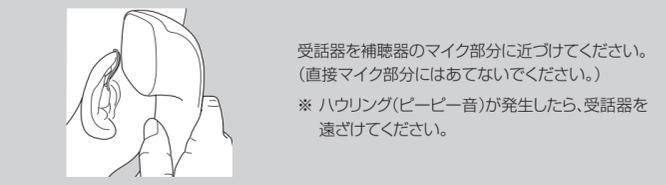

受話器を補聴器のマイク部分に近づけてください。（直接マイク部分にはあてないでください。）

※ ハウリング（ピーピー音）が発生したら、受話器を遠ざけてください。

※ 本補聴器は、携帯電話からの電磁妨害に対する最も厳格な基準を守っています。しかし、すべての携帯電話と適合性があるわけではありません。もし、お持ちの携帯電話での聞き取りが悪かった場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

2-6. iPhone、iPad、iPod touchとの使用について

本補聴器はiPhone、iPad、iPod touchに直接接続して使用することができます。本補聴器とのペアリングや接続した機器の使用方法についてはお買い求めの販売店にご相談いただくかホームページ**resound.com/compatibility**をご参照ください。

■ 対応端末について


本補聴器はiOS 8.X以降を搭載したiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone SE、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)に対応しています。

2-7. スムーズホンの使用について（オプション）

スムーズホン用のマグネットを取り付けた受話器を耳にあてると、お知らせ音が鳴り、自動的に補聴器が電話モードになります。受話器を耳から離すと、自動的に元のプログラムに戻ります。必要に応じて、受話器の最適な位置をお探しください。

両耳連動機能使用時 受話器を当てていない耳の音量が下がります。	販売店で設定必要	専用プログラム
---	-----------------	----------------

■ マグネットの取り付け方

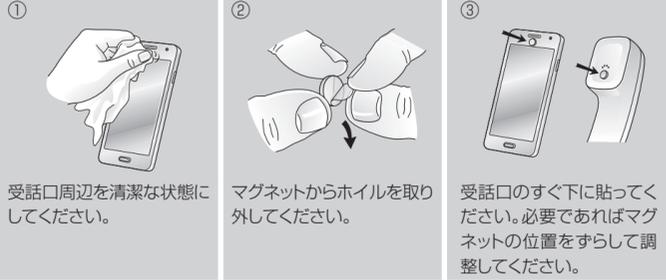

⚠ 警告

- スムーズホン用のマグネットは医療機器や電子装置へ影響を与える可能性があります。詳細はお使いの医療機器、電子装置の取扱説明書をご参照ください。記載がない場合は、30cm以上離してお使いいただく事を推奨します。
- スムーズホンプログラムに切り替わらない場合は、マグネットが受話口に対して最適な位置にない可能性があります。その場合は、マグネットを受話器の他の場所に動かしてください。
- 必ずリサウンドのスムーズホン用のマグネットをご使用ください。

2-8. テレコイルについて

本補聴器には、テレコイルが内蔵されています。テレコイルは、教室、公共施設、家庭内などのヒアリングループシステムのある場所で、他の音に阻害されることなく必要な音を聴取するときに使用します。また、強い誘導信号を出力するコイルを内蔵した受話器であれば、電話でお使いいただくことができます。テレコイルの詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

販売店で設定必要	専用プログラム
-----------------	----------------

2-9. 外部入力について（オプション）

外部入力により、テレビ、ラジオなどからの音をより良い音質で直接聞くことが可能です。オーディオシュー、FM受信機一体型を補聴器に取り付け、ケーブルもしくはワイヤレスFMシステムで音源に接続すると自動的に外部入力に切り替わります。

販売店で設定必要	専用プログラム
-----------------	----------------

■ オーディオシュー、FM受信機一体型の取り付け方（77、88タイプ）

① オーディオシュー、FM受信機一体型の先端を外部入力端子にしっかりとあててください。



■ オーディオシュー、FM受信機一体型の取り外し方（77、88タイプ）


① オーディオシュー、FM受信機一体型の表面の取り外しボタンを押してください。



※ 外部入力に接続する外部機器は、JIS規格が電気用品安全法、又は同等の安全性を備えるものをご使用ください。（例）電気用品安全法（PSE）マークが表示されたものなど

■ 電池ケースの交換方法（98タイプ）

① ピン取り外し用ジグで、電池ケースを止めているピンを外してください。
※ピンを完全に抜かず作業すると戻す時に簡単です。

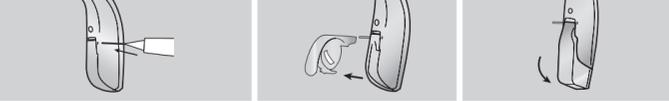

⚠ 注意

- 1つのFMチャンネルで2つ以上の送信機を使わないでください。
- オーディオシュー、FM受信機一体型のお手入れに、水や液体を使用しないでください。
- 電波を出すことを禁じられているエリアでは、FM送信機を使わないでください。
- FM電波は、他の受信機に受信される可能性があります。
- 外国でFMシステムを利用する際には、その国でそのチャンネルの使用が許可されているか事前にお買い求めの販売店にご確認ください。
- FM受信機一体型FM送信機の修理は、認定されたサービスセンターでのみ可能です。

3 使用上の注意

補聴器はきこえを助ける医療機器です。ここに示した警告や注意事項は補聴器を正しく使っていただき、装着者ご本人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。以下の項目をお読みになり、取扱いにご注意ください。

⚠ 警告

- お子様が触れないようご注意ください。**
飲み込むと窒息の危険を伴う小さなパーツを含んでいるので、幼児の手に触れさせないようお願いします。
- 飛行機に搭乗する際には、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。**

- スムーズホン用のマグネットは乳幼児の手の届かないところに保管してください。**
マグネットを誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、マグネットを鋭利と間違わないように注意し、薬を飲むときは必ず確認するようにしてください。
- 電波を出すことを禁じられているエリアでは、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。**
- リサウンドの補聴器を補聴器用ワイヤレスアクセサリと接続する際には、必ずリサウンドの補聴器用の機器（有料オプション品）をご使用ください。**
- フィッティングを行う専門家の方への警告:**
この補聴器は132dB SPL以上の出力があります。フィッティングの際には**充分注意**してください。

- 補聴器を装着して炎症が生じたら**…この補聴器の皮膚に接する部分には、かぶれや炎症などを起こしにくい材料を使用していますが、装着者の体質によっては、まれにかぶれや湿疹などを生じることがあります。このようなときは、ただちに補聴器の装着を中止し、医師へご相談ください。
- 低周波治療器・電磁（IH）調理器などによって補聴器に雑音が発生することがあります。**

- <使用済補聴器の処理方法>**
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」で補聴器は特定対象品目に指定されました。ご用になった補聴器は、お住まいの市町村の指示に従って処理してください。
- ご不用になった付属品は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。**
- ワイヤレス機能がオンになっているとき、ワイヤレス機器と通信するため、デジタル符号化された低出力伝送が使われます。そのため、ワイヤレス機器を使用しているときに近くの電子機器に影響を与える可能性があります。万が一機器への影響が認められた場合は、補聴器を遠ざけてください。**

- ご不用になった付属品は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。**
- ワイヤレス機能がオンになっているとき、ワイヤレス機器と通信するため、デジタル符号化された低出力伝送が使われます。そのため、ワイヤレス機器を使用しているときに近くの電子機器に影響を与える可能性があります。万が一機器への影響が認められた場合は、補聴器を遠ざけてください。**

- 補聴器はいつも清潔にしておいてください。**
就寝時には必ず補聴器を外してお手入れをしてください。
- 適切な音量でご使用ください。**
必要以上に大きな音を長時間聴取すると、聴力低下を招く場合があります。
- 補聴器はお使いになる方のきこえ具合に合うように調整する必要があります。**
この補聴器は、販売店でお使いになる方のきこえ具合に合わせて調整してもらってから装着してください。

⚠ 禁止

- 補聴器を水に濡らさないでください。**
補聴器を装着したまま泳いだり、お風呂に入ったり、洗顔などらないでください。
- 補聴器を分解したり、ご自分で修理・改造などを絶対になさらないでください。**
- 補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを絶対に使わないでください。**
- 補聴器を他人にお貸しにならないでください。**
補聴器は使用者本人以外絶対にご使用にならないでください。他の人がこの補聴器を装着しても音量や音質が合わず聞こえにくいばかりでなく、耳を痛める場合があります。
- 病院内の検査機器にご注意ください。**
MRIやCTスキャナーなどの検査は補聴器に損傷をあたえる可能性がありますので、同種の検査中は補聴器の装着をおやめください。

● 病院内の検査機器にご注意ください。MRIやCTスキャナーなどの検査は補聴器に損傷をあたえる可能性がありますので、同種の検査中は補聴器の装着をおやめください。

4 電池使用上の注意

⚠ 警告

- ショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒には携帯・保管しないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、電池を鋭利と間違わないように注意し、薬を飲むときは必ず確認するようにしてください。**
- 電池内部の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、ただちに医師へご相談ください。

⚠ 注意

- ＋、－を逆向きに入れしないでください。
- 必ず指定されたタイプの電池を使用してください。

5 故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
音がきこえない／音の大きさが不十分	電源が入っていない。電池が消耗している。音の出口が詰まっている。チューブが詰まっている。耳せんとチューブが正しく装着されていない。装着者の耳に過度の耳あかが詰まっている。設定音量が小さい。	電池ケースを閉じる。電池を新しい物に交換する。音の出口を掃除して詰まりをとる。チューブを新しい物と交換する／掃除する。注意して装着し直す。医師に相談する。可能であれば音量を上げる、または販売店に相談する。チューブを交換する。
ハウリング（ピーピー音）がする	チューブがゆるんでいる。耳せんとチューブが正しく耳に入っていない。補聴器の設定が合っていない。耳せんの大きさが外耳道に対して合っていない。装着者の耳に過度の耳あかが詰まっている。	注意して入れ直す。販売店に相談する。販売店に相談する。医師に相談する。
音が不明瞭、音が歪む	電池が切れかかっている。プログラムの設定が合っていない。	電池を新しい物に交換する。販売店に相談する。
ワイヤレス機能が使えない	フライトモードに入っている。電池が消耗している。	フライトモードを解除する。電池を新しい物に交換する。

※ 対策をしても解決しない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

6 性能表 2cmカプラ 測定規格：JIS C 5512：2015







性能表	表示単位	77タイプ（クローズ）	88タイプ（ハイパワー）	98タイプ	
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA-OSPL90	±4dB SPL	123	128	131
最大音量利得	ピーク	+3dB SPL以下	128	131	141
	HFA-FOG	±5dB	52	68	69
等価入力雑音レベル	ピーク	+3dB以下	59	72	63
		+3dB SPL以下	22	21	26
	500Hz	+3%以下	0.4	0.7	4
	800Hz	+3%以下	0.4	0.4	0.4
	1600Hz	+3%以下	0.5	0.3	0.9
電池の電流		+20%mA以下	1.2	1.1	3.3
電池寿命(1.4V)	PR48/13	時間	215	230	—
	PR44/675		—	—	195
規準周波数レスポンス	周波数範囲	Hz	100 - 6850	100 - 4960	100 - 5860
	規準利得(RTG)	dB	47	50	54
試験用ルーブに対する等価感度		±4dB SPL	-1	1	2
誘導コイル入力の最大感度レベル	HFA-MASL	±6dB SPL	81	98	101
定常状態入出力特性(2000Hz)	90dB入力	±5dB SPL (70dB正規化)	102	108	113
			127	123	136
最大感度となる方向			垂直	垂直	垂直
使用目的、又は効果			身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること。ただし、気導式のものに限る。		

性能表	77タイプ（クローズ）	88タイプ（ハイパワー）	98タイプ
使用時の環境条件	温度0～40℃、湿度40℃/93%以下、気圧500～1100hpa		
電撃保護	内部電源機器	B形装着	
輸送・保管条件	温度-20～60℃、湿度90%RH以下（結露なきこと）、気圧500～1100hpa		

※ ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

※ 数値は参考値です。

7 音響諸特性 2cmカプラ 測定規格：JIS C 5512：2015

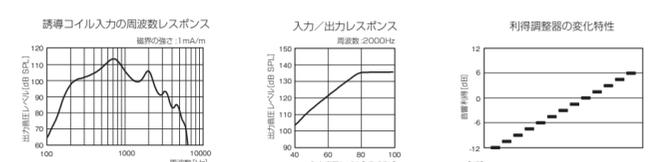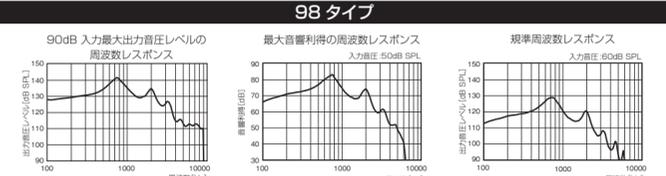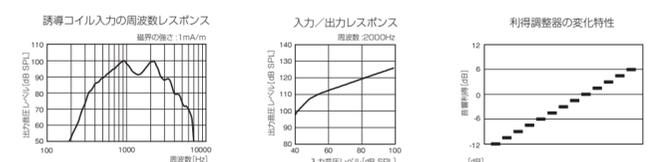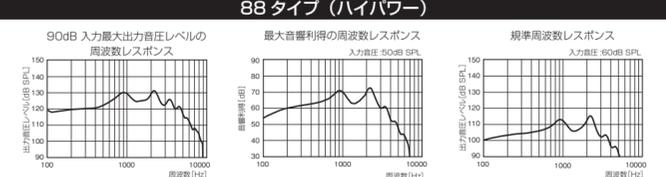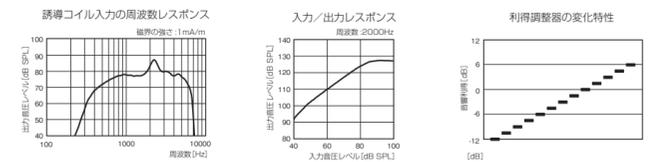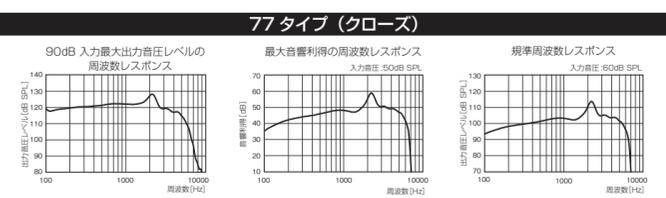

8 アフターサービスについて

<p>■ 保証内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プレミアムアップ（リサウンドアプ スマート 9.7のみ） <p>紛失・破損保証</p> <p>リサウンドアップ スマート 9はお買い上げの日から2年間、リサウンドアップ スマート 7は1年間、紛失またはユーザー様の過失による損傷の場合、最初の1回に限り無償にて新品交換、修理対応を行います。</p> <p>※ 但し紛失保証時には保証書と共に紛失届が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2年間無償保証+ほっとシステム <p>お買い上げ日から2年間無償修理いたします。その後、1回の修理につき3年目は20,000円、4年目は40,000円を上限とし、これを超える修理費用は請求いたしません。</p> <p>※ 自然故障の場合のみ適用します。修理費用は補聴器1台につきの料金です。</p>	<p>■ 保証書（別添付）</p> <p>お買い上げ日、販売店名などの記入を必ずお確かめになり、大切に保管してください。保証書適用時には、保証書が必要となります。</p> <p>■ 修理について</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 保証期間中 <p>保証書を添えてお買い求めの販売店へお持ちください。保証書の規定に従って、修理いたします。保証書の提示がない場合は有料となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 保証期間後 <p>お買い求めの販売店にご相談ください。修理により使用可能な場合は、ご希望により有料で修理いたします。</p> <p>■ 仕様について</p> <p>改良のため仕様は予告なく変更される場合があります。</p>
--	--

<p>■ 商標登録について</p> <p>Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。</p>	<p> </p>
---	----------

「Made for iPhone」とは、iPhone専用接続よう設計され、アップル社が定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップル社は、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本製品をiPhoneと共に使用すると、ワイヤレス機能に影響を及ぼす可能性があります。

耳かけ型補聴器 簡単ガイド

取扱説明書

製造販売元

GNヒアリングジャパン株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3
MMパークビル8F


☎ 0120-921-310 (TEL)
0120-636-392 (FAX)

ReSound GN

KTG0671 02 1706A-170622K


電池の入れ方・出し方

①

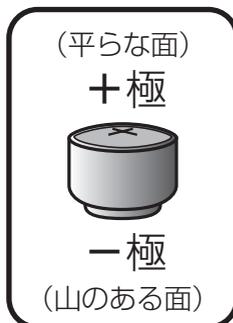


電池のテープをはがして、1分程度経過してからご使用ください。

②

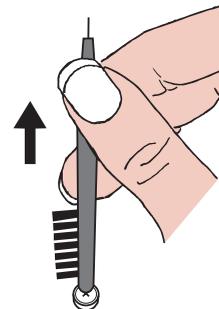

耳あか掃除ブラシ先端の磁石に+マークのついている面をつけ、そっと持ち上げてくださいます。

③

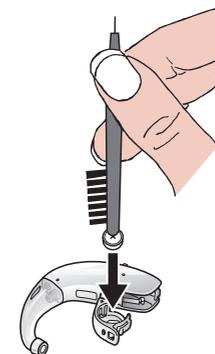

補聴器の電池ケースにまっすぐ入れてください。耳あか掃除ブラシを横にスライドさせ、電池から引き離してください。

補聴器の着け方・外し方


耳せんの場合

①



電源を入れ、補聴器を耳の上にかけます。

②

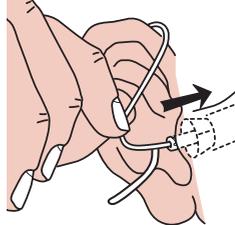

耳せんを耳の中に、しっかり入れてください。

ミニチューブご使用の場合




スポーツロックを耳たぶ上側のくぼんだところに這わせてください。

外し方 親指と人差し指でチューブをつまみ、真横に引き出してください。

イヤモールドの場合

①

前から後ろへ回す

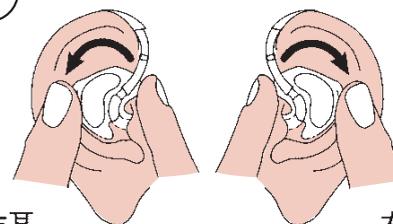

右耳

左耳

イヤモールドを指先で軽く持ち、矢印の方向へ回しながら、ゆっくりと耳の中へ押し込んでいきます。

②



補聴器を耳の後ろに乗せます。

外し方 補聴器を着ける時とは反対の方向に回しながら引き出し、補聴器とイヤモールドをつないでいるチューブをつまみ、静かに耳から外してください。

日ごろのお手入れ

① 毎日のお手入れ

ご使用後は、付属の耳あか掃除ブラシで耳あかを取り除き、クリーニングクロス又はティッシュペーパーなどで油分や湿気を拭き取ってください。耳せん・イヤモールドの掃除は、耳あかが補聴器本体に入りこまないように音の出口を下にして行ってください。




② 耳せんの交換

耳せんは3ヶ月に1度程度は交換が必要です。耳せんはお買い上げの販売店で交換されることをお勧めいたします。

③ チューブと耳せんまたはイヤモールドの掃除

耳あか掃除ブラシややわらかい布を使って、汚れや耳あかを取り除いてください。取り除けない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

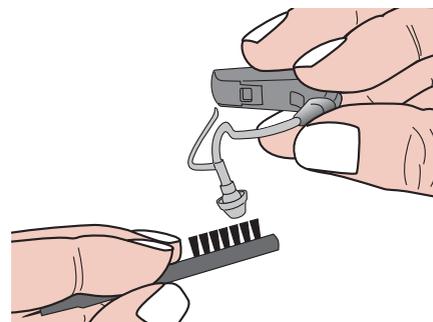

- ※ チューブ内に水滴が残る危険があるため、洗わないでください。水滴が残ってしまうと音声の伝わりが妨げられたり、補聴器の電子部品に悪影響を与える可能性があります。
- ※ 絶対にご自分でイヤモールドの形を変えないでください。

補聴器の保管について

補聴器はいつも乾燥した状態にしておいてください。補聴器は汗や湿気に弱いため、装用後は必ず、乾燥ケースに一晩入れておいてください。この時、必ず電池を抜いてください。※電池を乾燥ケース内に入れると、電池寿命が極端に短くなる可能性があります。

電池置き場



注意・禁止事項

● 熱を避ける



● 湿気を避ける



注意

- (1) 乾燥剤を焼いたり、電子レンジで温めたりなどして、再利用しないでください。乾燥剤の色が変わったら新しいものと交換してください。
- (2) 乱暴な扱いは補聴器の故障の原因となります。床など固い面に落とさないでください。

禁止

- (1) 補聴器を水や他の液体に浸すことは、故障の原因となりますので、絶対に避けてください。
- (2) シンナー、ベンジン、ベンゾールまたは濡れた布で拭くことは避けてください。
- (3) 補聴器を乾燥させる目的でヘアドライヤーや電子レンジなどを使わないでください。また、直射日光に長時間さらさないでください。外部変形及び外部変色、内部損傷や焼失の原因となります。