


HF3 VAHASUOJAN VAIHTAMINEN

Ruuvatkaa vanha vahasuoja pois suodatinkiekossa olevalla sinisellä ”ruuvimeisselillä”. Saman sinisen työkalun toisella päällä poimitaan kiekosta uusi vahasuoja, joka painetaan kiinni kojeeseen.

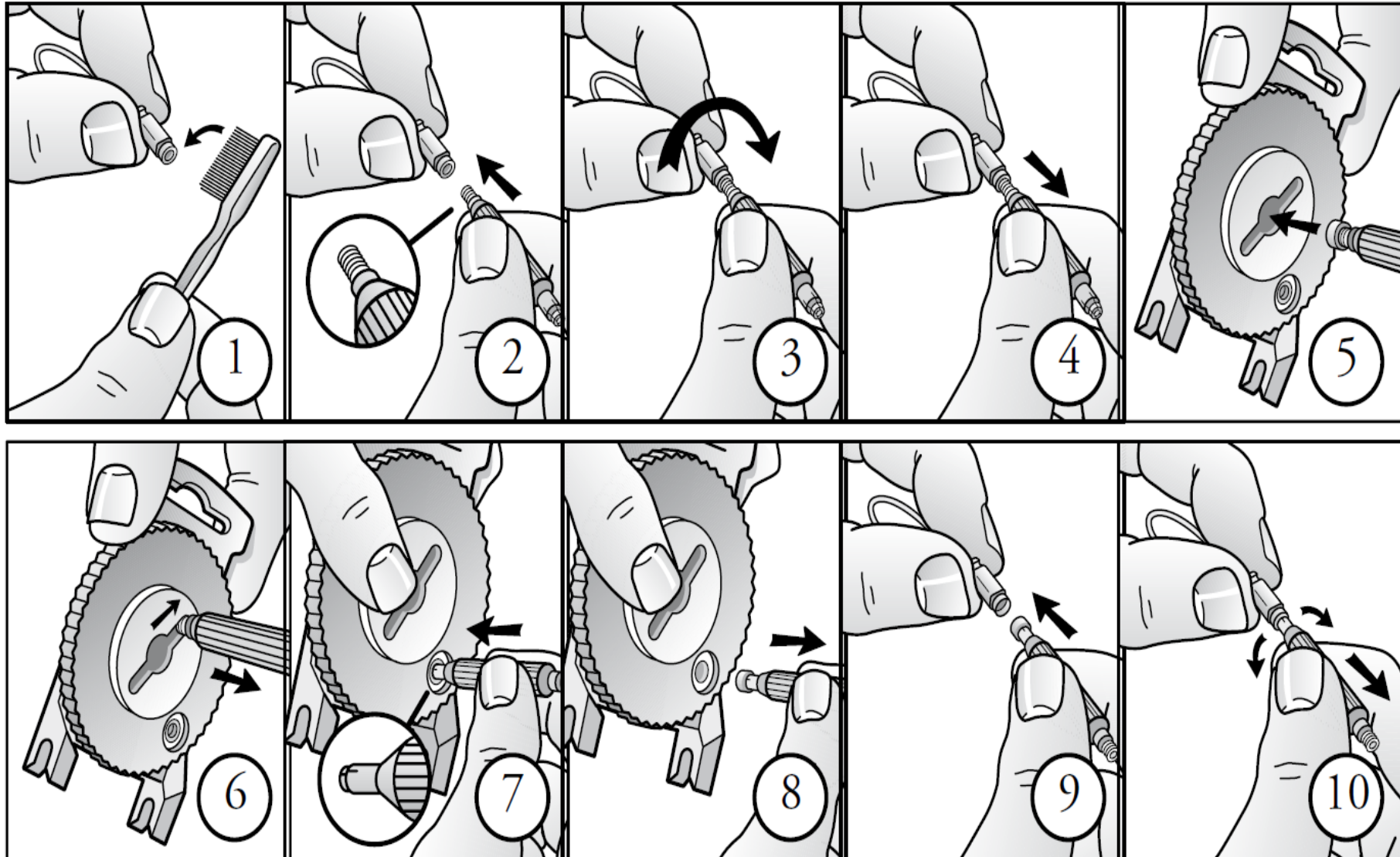

BYTE AV HF3 VAXSKYDD

Skruva loss det gamla filtret med hjälp av den blå ”skruvmejseln” i vaxfilterpaketet. Med andra ändan av samma blåa verktyg plockar man ett nytt filter ur paketet och trycker fast det i hörapparaten.

