



# Cerustop


## Vahasuojan vaihtaminen

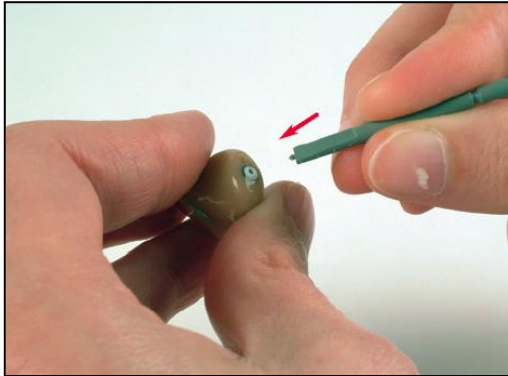


1. Paina asennustikun **poistopää** kuulokojeessa olevaan vahasuojaan.

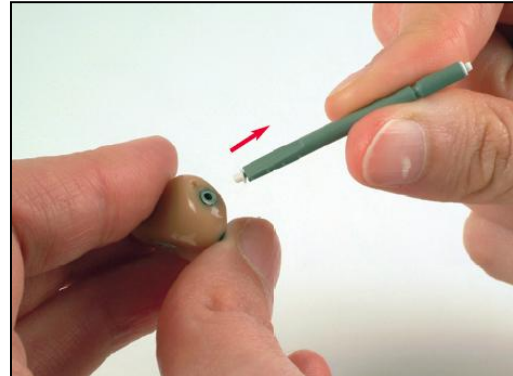

2. Vedä varovasti vaihdettava vahasuoja ulos kojeesta.

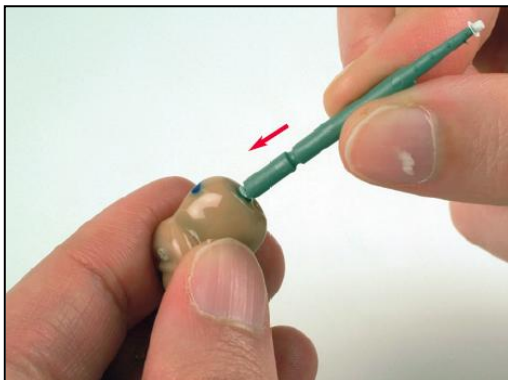


3. Paina kevyesti asennustikun toisessa päässä oleva **uusi vahasuoja** ääniaukkoon.

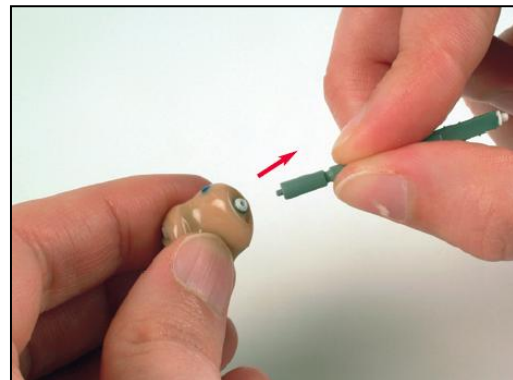


4. Vedä asennustikku kojeesta. Varmista sormella painaen, että vahasuoja kiinnittyy kojeeseen.

# Cerustop


## Byte av vaxfilter

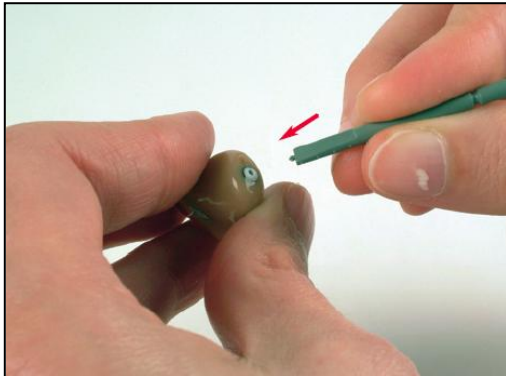


1. Tryck pinnens **tomma ända** in i hörapparatens vaxfilter.

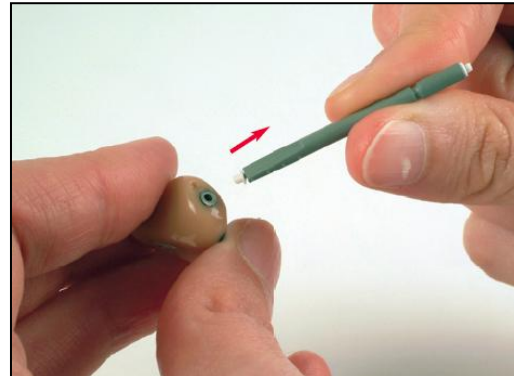

2. Dra försiktigt ut det gamla vaxfiltret ur hörapparatens.

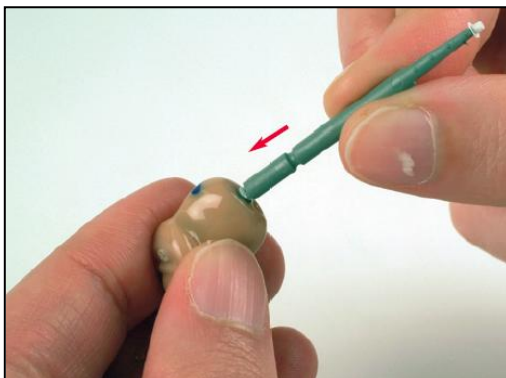

3. Tryck varsamt in ändan med det **nya vaxfiltret** i ljudkanalen.

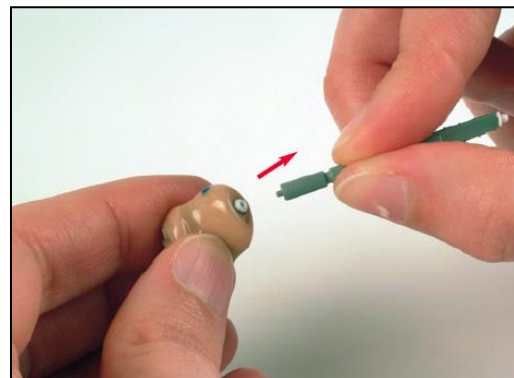

4. Dra ut pinnen. Rör försiktigt med fingret på vaxfiltret för att kontrollera att det fastnat.